



 MultiDoctorShop  
Medical products at home  
We provide the official  
document of the manufacturer  
[www.multidoctorshop.com](http://www.multidoctorshop.com)

**AirFit™** N10  
Masque nasal



Votre regard  
sur l'apnée  
du sommeil  
risque de  
changer !

Masque nasal de nouvelle génération, le masque AirFit N10 va changer votre regard sur l'apnée du sommeil. L'absence de support frontal permet de bénéficier d'une vision dégagée.

Léger et compact, grâce à son nombre de pièces réduit, le masque AirFit N10 va souffler un nouvel air de liberté.



### Simplicité

Le masque AirFit N10 a été pensé pour faciliter la vie de vos patients:

- Attaches EasyClick pour une mise en place intuitive
- Bulle nasale qui se fixe en un clic au support
- Circuit respiratoire intégré qui s'adapte aux mouvements

### Confort

Le harnais SoftEdge™ et ses housses en tissu apportent confort et douceur. De plus, la fuite intentionnelle diffuse l'air en douceur loin du patient et de son partenaire.

### Champ de vision dégagé

Grâce à son entourage discret qui se positionne sous les yeux, le masque AirFit N10 offre aux patients un champ de vision totalement ouvert.

# Faites de l'AirFit N10 votre choix n°1

Basé sur l'expérience et le confort qui ont fait la renommée des masques ResMed, le masque AirFit N10 offre un champ de vision dégagé pour un traitement mieux accepté.

Lors de tests cliniques<sup>1</sup>, le masque **AirFit N10** a été classé **1<sup>er</sup>** parmi d'autres masques nasaux ResMed pour sa **facilité d'utilisation, son confort et sa liberté visuelle.**


N'hésitez plus et faites du masque **AirFit N10** votre **choix n°1** parmi les masques nasaux.



## Caractéristiques et avantages du masque AirFit N10

### Le harnais SoftEdge™ et ses sangles amincies

sont composés d'un textile conçu pour réduire les marques sur le visage et assurer confort et maintien.

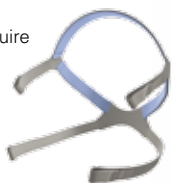

### La bulle nasale se clipse et se déclipse facilement

**Les événements à diffusion circulaire** diffusent l'air en douceur et en silence, pour limiter la gêne pour le patient et son conjoint.

**Le circuit respiratoire flexible** est intégré à l'entourage rigide. Très souple, il s'adapte aux mouvements du patient dans son sommeil.

**La bulle nasale Spring Air™ à double jupe** est conçue pour fournir étanchéité et confort tout au long de la nuit.

**L'entourage discret** offre un champ de vision dégagé et un contact réduit avec le visage, sans compromettre la stabilité du masque<sup>1</sup>.


**Les attaches EasyClick** offrent une mise en place intuitive et rapide.

**Les housses souples en option** favorisent le confort au niveau des joues.



<sup>1</sup> Rapport clinique ResMed D632-105 - Août 2013 - 15 participants - comparaison des masques AirFit N10, Mirage FX et Wisp.  
Rapport clinique ResMed D632-124 Novembre 2013 - 20 participants - comparaison des masques AirFit N10 et Wisp.

# Composants du masque AirFit N10

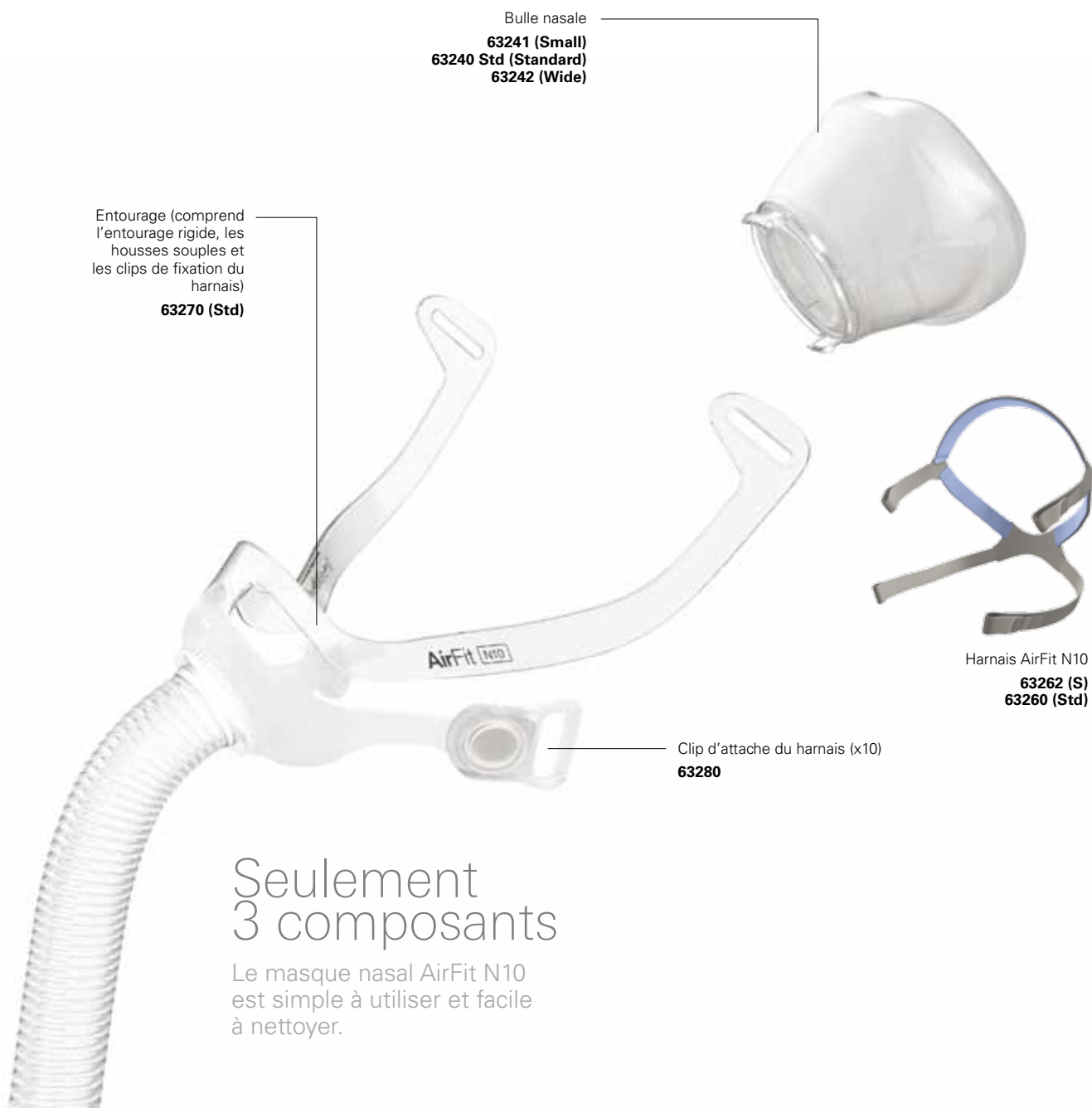

## Codes produits

Masque AirFit N10, taille Small*	63227
Masque AirFit N10, taille Standard	63209
Masque AirFit N10, taille Wide	63211

\*Le masque AirFit N10 taille S est livré avec un harnais taille S

Remarque : Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisateur

**AirFit**<sup>™</sup> N10

Masque nasal

## Guide de mise en place du masque AirFit N10



- Alignez le bas de la bulle avec la partie inférieure de votre nez, placez la bulle sur votre nez, et maintenez-la sur votre visage.



- Assurez-vous que les logos ResMed et AirFit soient tournés vers l'extérieur, puis faites passer le harnais par-dessus votre tête, en le tirant vers l'arrière de votre crâne.



- Passez les sangles inférieures sous vos oreilles et attachez les clips EasyClick sur les côtés de l'entourage.



- Détachez les bandes velcro des sangles supérieures du harnais.
- Ajustez les sangles uniformément jusqu'à ce que le masque soit confortablement ajusté, puis rattachiez les bandes adhésives.



- Détachez les bandes velcro des sangles inférieures du harnais. Ajustez les sangles uniformément jusqu'à ce que le masque soit stable puis rattachiez les bandes velcro.
- Connectez l'extrémité du circuit de votre masque au circuit respiratoire de votre appareil.



- Mettez votre appareil en marche afin qu'il insuffle de l'air.
- Ajustez la bulle et le harnais jusqu'à ce que le masque soit confortable sans être écrasé ou déformé.
- Votre masque est maintenant prêt.

**CONSEIL :** Afin d'obtenir une bonne étanchéité, veillez à ne pas serrer excessivement le harnais.



- Ajustez la sangle inférieure du harnais au-dessus ou en-dessous de vos cheveux en fonction de votre coiffure.
- Des housses en tissu sont disponibles en option.



**Remarque :** Pour les instructions d'utilisation complètes, reportez-vous au guide d'utilisation.